

# トルマリンウォーマー マニュアル

院名 \_\_\_\_\_

日付 \_\_\_\_\_ 年 月 日

## はじめに

このたびは、トルマリンウォーマーセットをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
ます。

トルマリン温熱療法を十分に活用していただくために、ご使用前にこのマニュアルを  
一通りお読みください。

また、お読みになった後は、必ず保管してください。



トルマリンウォーマー 大

[本体のサイズ] W460mm × D480mm × H680mm

[庫内のサイズ] W362mm × D320mm × H488mm

[電源] AC100V

[消費電力] 240W

[安全装置] \*加熱防止装置

(設定温度 +5℃ & 最高温度 90℃)

\*過電流保護 \*過電圧保護

[温度設定の範囲] 20℃~75℃ PID 制御方式

### お客さまへのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、販売店まで、ご連絡ください。

## I. 使用する前に

各業者よりすべて納入後に、組み立て等のセッティングをお願い致します。

1) すべて揃っているか確認する

- トルマリンウォーマー
- トルマリン袋
- タイマー
- マグネット

2) トルマリンウォーマーを置く場所を決める。

コンセントの位置に注意してください。

3) トルマリンウォーマーを設置する。

トルマリンウォーマーは重さがありますので、複数人で設置してください。

4) トルマリンウォーマーの鉄板をセットする。

- ・トルマリンウォーマー内扉（透明）のフィルムを両面はがす。
- ・トルマリンウォーマー鉄板のフィルムをはがす。
- ・トルマリンウォーマーの鉄板をセットする。

5) トルマリン袋をトルマリンウォーマーに入れる。

横向きにして1段に4つつ入れてください。

○ 置き方のポイント

段の手前にある穴はなるべく塞がないようにする

3段目はファンがあるので、奥まで入れすぎない

悪い例)



良い例)



6) トルマリンウォーマーのスイッチを入れる

スイッチは通常入れっぱなしにしておいてください。

\* この時点では電源はつきません

7) コンセントをタイマーにつなげる

8) タイマーのコンセントを入れる

トルマリンウォーマーの電源が入ります。

\* 50Hz 地域の場合は、周波数切り替えレバーを 50Hz の位置に合わせてください。

9) トルマリンウォーマーの温度を設定する

1. [▲][▼]を押して温度設定をする
2. [MODE]を押す

○ 温度設定の目安

1～2月	75度
3～4月	70度
5～9月	63度
10～11月	70度
12月	72度

温度設定は、患者様の部位および個人差により加減してください。

皮膚過敏症の患者様の場合、温度設定・当て方等に特にご注意ください。

(タオルの上からあてる等)

\*直接皮膚に当てると、火傷の恐れがありますのでご注意ください。

10) マグネットを一番上の段右側につける



## Ⅱ. 通常業務

ウォーマーにホットパックを入れて、最低 4 時間、温めてからご使用ください。

### 1) タイマーをセットする

タイマーの使い方は、添付されている取扱い説明書を参照してください。

院の診療時間に合わせてタイマーをセットしてください。

例) 診療時間：9 時～13 時 16 時～20 時半 の場合

○ 通常 5 時 ON → 13 時 OFF → 14 時半 ON → 21 時 OFF

○ 休日前

4 時半 ON → 9 時 OFF

節電のため、前日にタイマーを入れに来なくてもよいように、朝の設定のみしておく。休み明けには、忘れずにタイマーを元に戻す。

\* 温まり方が弱いと感じる場合は、長めに温めてください。

### 2) 温まっているか確認する

下の 3 段は上に比べて熱くなっているので、注意してください。

### 3) トルマリン袋を取る

マグネットがついている段の下の段から、使用する。

鉄板が熱いので、手が当たらないように注意しながら取り出してください。

\* 手前の 2 つを取り、それを利用して上の鉄板を少し持ち上げると取りやすい。

\* ふくらはぎ用を複数段ご使用の場合は、赤のマグネットをご利用下さい。



この段から使用する

### 4) トルマリン袋をしまう

あいている段の上からしまい、マグネットを最終使用した段の右側に移動する。

\* 温度が下がりやすいため、素早くしまい素早く扉をしめる。

\* 出し入れしたトルマリンパックを適温で使用するため、マグネットを利用し、順序よく「先入れ先出し」でご使用下さい。

### Ⅲ. ふだんのお手入れについて

- 月に2回程度、庫内の鉄板を全てはずし、ホコリを取り除いてください。
- ドアの開閉は速やかに行い、ドアが開いた状態のまま放置しないで下さい。  
ホコリが入り込み、ファンの不具合を招く原因となる恐れがございます。
- コード・プラグ・コンセントの点検をして下さい。  
電源コードやプラグが傷んでいたり、ほこりが溜まっていると、火災の原因となる恐れがございます。
- トルマリンホットパック以外のものに使用しないで下さい。  
特に、庫内に湿ったものがあると、故障・感電の原因となる恐れがございます。
- その他、付属の「取扱説明書」をご確認いただき、安全にお使い下さい。

- 本商品を本来の使用目的以外でお使いになった場合、発生したトラブルに関して、当方では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

〒533-0021

大阪府大阪市東淀川区下新庄 5-2-18

**株式会社 タオ**

トルマリン事業部

TEL 06-6160-6080

FAX 06-6160-0662